

S -IgE (1673)**Indikaatiot** Allergian selvittely.**Näyte** 1 ml seerumia

Lasten näytteille minimi seerumimäärä 150 ul.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluoroentsyymi-immunometrinen (ImmunoCAP™)**Toimitusaika** 1-5 työpäivää

Viitearvot	Aikuiset	alle 110 kU/l
	Lapset, 0 kk - 5kk	alle 20 kU/l
	6 kk-1 v	alle 70 kU/l
	2-3 v	alle 110 kU/l
	4-7 v	alle 130 kU/l
	8-14 v	alle 320 kU/l
	15-17 v	alle 160 kU/l

Tulkinta Kohonnut seerumin IgE:n kokonaisarvo viittaa allergiaan. Kokonaisarvo on selvissä allergisissa sairauksissa (astma, allerginen ihottuma) koholla, mutta lievissä yksittäisen allergeenin aiheuttamissa allergioissa se ei epäherkkänä ole diagnostinen. S -IgE-pitoisuus saattaa olla koholla myös ei-allergisista syistä. Loisinfektiossa (suolinkaiset, syyhypunkki) IgE-pitoisuus nousee ja pikkulapsilla pitoisuus on koholla infektioiden jälkeen.

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi