

S -TBG (2835)**Indikaatiot** Poikkeavan T4- tai T3-pitoisuuden selvittäminen.**Näyte** 1 ml seerumia.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Radioimmunologinen (RIA).**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää

Viitearvot	alle 31 pv	483 - 786 nmol/l
	1kk - 1v	289 - 799 nmol/l
	1 - 15v	272 - 672 nmol/l
	16 - 49v	209 - 535 nmol/l
	yli 49v	202 - 646 nmol/l
	Raskaana olevat	303 - 1191 nmol/l

Tulkinta Seerumin tyroksiinia sitova globuliini (TBG)-pitoisuuksia kohottavat estrogeenit, ehkäisytabletit, raskaus ja akuutti intermittoiva porfyria. Seerumin TBG:tä alentavat androgeenit, anaboliset steroidit, glukokortikoidit sekä taudit, joihin liittyy proteiinikatoa (nefroosi) tai proteiinisynteesin heikkenemistä (maksakirroosi). Kohonnut tai alentunut TBG:n määrä saattaa johtua myös perinnöllisistä syistä.

Alihankinta Kyllä.**Konsultointi**

Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi