

U -INTP (4477)**Indikaatiot** Osteoporoosin lääkehoidon arviointi

Näyte 3 ml kertavirtsaa,
Näytteeksi otetaan kahden tunnin aikana rakkoon kertynyt aamuvirtsa.
Näyte otetaan säilöntäaineettomaan putkeen.

INTP -erityksellä on vuorokausivaihtelu. Tästä syystä on tärkeää, että seurannassa henkilön näytteet otetaan aina samaan aikaan vuorokaudesta.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä valolta suojattuna.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen**Toimitusaika** 3-10 työpäivää**Viitearvot**

Lapset, 0 - 1 v	102 - 4769 nmol BCE/mmol Krea
2 - 5 v	34 - 1752 nmol BCE/mmol Krea
6 - 10 v	90 - 1356 nmol BCE/mmol Krea
11 - 13 v	34 - 2158 nmol BCE/mmol Krea
14 - 17 v tytöt	55 - 378 nmol BCE/mmol Krea
pojat	102 - 1048 nmol BCE/mmol Krea
18 - 20 v	34 - 780 nmol BCE/mmol Krea

Miehet, yli 20 v 13 - 78 nmol BCE/mmol Krea

Naiset, yli 20 v 14 - 74 nmol BCE/mmol Krea

-postmenopausaaliset 26 - 124 nmol BCE/mmol Krea

Lasten viitearvot lisätty 27.11.2015

Tulkinta Suurentunut INTP:n erityys ja alhainen luuston mineraalipitoisuus puoltavat osteoporoosin estolääkityksen aloittamista. Hoidon aikana aleneva INTP:n erityys puhuu suotuisan hoitovasteen puolesta.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi