

**S -Mians (2349)****Indikaatiot** Mianseriinihoidon seuranta.**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.

**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Viitearvot** Terapeuttinen alue 75 - 270 nmol/l.  
(20 - 70 µg/l)

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen (LADR).

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi