

**-BopeNhO (4345)**

**Indikaatiot** Hinkuyskän diagnostiikka, kun oireiden kesto on alle 3 viikkoa. Jos oireet ovat kestäneet yli 3 viikkoa, suositeltava tutkimus on vasta-ainetutkimus: [S-BopeAb](#).

**Näyte** Nenänierutikkunäyte, esim. mininukkatikku. Tikku katkaistaan eSwab-nestekuljetusputkeen. Mikäli eSwab-putkea ei ole saatavilla, tikku voidaan lähettää tehdaspuhtaassa putkessa kuivana.

**Säilytys ja lähetys** Toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Säilyy huoneenlämmössä 1 vrk. Pidempiaikainen (4-5 vrk) jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Nukleinihaponosoitus. Positiivisen näytteen viljely.

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Positiivinen tulos on diagnostinen.

**Kommentti** THL - Ohjaus 17/2017:  
[Toimenpideohje torjuntatoimista hinkuyskätapauksien yhteydessä](#)

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 018573  
taru.meri@vita.fi