

S -ChtrAb (1737)

Katso myös *Chlamydia trachomatis*, nukleiinihappo (kval) ja reumatutkimus.

Sisältää osatutkimukset:

S -ChtrAbA, KL 4498

S -ChtrAbG, KL 4100

S -ChtrAbG voi pyytää myös erillisenä tutkimuksena.

Indikaatiot Nivelitulehdusten erotusdiagnostiikka, infertiliteetin selvittely tai epäily komplisoituneesta *Chlamydia trachomatis* -infektiosta.

Näyte 2 ml seerumia.
Parinäytteet suositellaan otettaviksi kahden viikon välein.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen (EIA).

Toimitusaika 2-3 työpäivää

Viitearvot S -ChtrAbA negatiivinen alle 9 U/ml
S -ChtrAbG negatiivinen alle 10 U/ml

Tulkinta Vasta-aineet nousevat *Chlamydia trachomatiksen* aiheuttamissa syvissä ja kroonisissa infektioiden sekä reaktiivisissa nivelitulehduksissa. Vasta-aineet säilyvät infektion jälkeen usein kauan korkealla tasolla. Pinnallisissa infektioiden ei vasta-ainetaso yleensä merkittävästi nouse, eikä vasta-ainemäärityksestä siten ole hyötyä.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi