

-HAE (12692)

Sisältää seerumista tehtävät tutkimukset:

[S -C1Inh \(1209\)](#)

[S -C3 \(2106\)](#)

[S -C4 \(2107\)](#)

HUOM! Lisäksi tulee pyytää erikseen sitraattiplasmasta tehtävä tutkimus: [P -C1InhBk \(4098\)](#). Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö omalla näytetunnuksellaan ja oma näyteputki.

Indikaatiot Hereditaarisen angioödeeman diagnostiikka.

Näyte 2 ml seerumia.

Lisäksi tulee erikseen (näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö omalla näytetunnuksellaan) tilata tutkimus P -C1InhBk (4098), johon 2 ml sitraattiplasmaa.

HUOM! Merkitse näyteputkiin näytemateriaali (seerumi / sitraattiplasma).

Säilytys ja lähetys Seerumi: Säilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Erikseen pyydettävässä P -C1InhBk (4098) tutkimuksessa plasma erotetaan mahdollisimman pian (30 min sisällä) ja näyte pakastetaan. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen (S -C1Inh, S -C4, P -C1InhBk)